

# INSTRUKCJA

## WYKONANIA BADANIA W KIERUNKU USTALENIA OJCOSTWA I POKREWIEŃSTWA

### SKŁAD ZESTAWU:

- Instrukcja wykonania badania w kierunku ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa
- Formularz zamówienia badania
- Wymazówki (3 sztuki)
- Rękawiczki (2 pary)
- Woreczek strunowy do zapakowania mikroślądów (3 sztuki)
- Wizytówka PAPGEN z danymi kontaktowymi oraz kodem zlecenia
- Koperta zwrotna z opłaconą przesyłką Poczty Polskiej zaadresowana na PAPGEN
- Koperta zwrotna z etykietą firmy kurierskiej DHL zaadresowana na PAPGEN



## WYMAZ

### PRZYGOTOWANIE DO BADANIA:

Co najmniej 3 godziny przed pobraniem wymazu (w przypadku dzieci 1 godzina) nie należy spożywać posiłków oraz płynów (z wyjątkiem wody), palić papierosów, przyjmować leków, myć zębów. W jamie ustnej nie powinno być żadnych ciał obcych (gum do żucia, cukierków, lizaków i innych).

### INSTRUKCJA POBRANIA:




1. Załóż rękawiczki ochronne!




2. Wyjmij wymazówkę z folii ochronnej. Opisz wymazówkę (stopniem pokrewieństwa - domniemany ojciec, matka, dziecko itp. lub A, B, C itd.)

**UWAGA!** Opis musi być spójny ze zleceniem badania oraz datą pobrania.

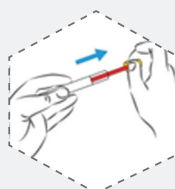


3. Wyjmij wymazówkę z osłonki trzymając za żółtą końcówkę i włóż do jamy ustnej.

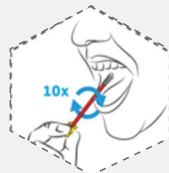

4. Potrząj wacikiem wewnętrzną stronę policzka **10 razy** z prawej i z lewej strony.




5. Włóż wymazówkę do osłonki uważając, aby nie dotknąć końcówką innej powierzchni.

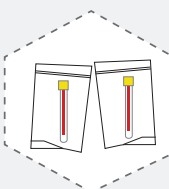


6. Umieść osłonkę z wymazem w woreczku foliowym. Zdejmij rękawiczki. Postępuj w ten sam sposób w przypadku materiału pobieranego od każdej z badanych osób.

## MIKROŚLADY

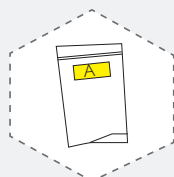

1. Opisz woreczek strunowy (stopniem pokrewieństwa - domniemany ojciec, matka, dziecko itp. lub A, B, C itd.).

**UWAGA!** Opis musi być spójny ze zleceniem badania oraz datą pobrania.

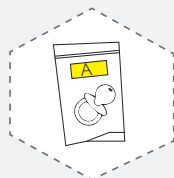

2. Załóż rękawiczki ochronne! Włóż mikrośląd do woreczka strunowego i zamknij go. **Każdy mikrośląd powinien być w osobnym woreczku.**

### LISTA MIKROŚLADÓW:

- szczoteczka do zębów
- guma do żucia
- smoczek
- używana chusteczka higieniczna
- niedopałek papierosa
- pasek od glukometru
- używany plaster
- obcięte paznokcie

**Mikroślady w jednym woreczku muszą pochodzić od jednej osoby.**

**UWAGA!** Należy zachować niewykorzystaną wymazówkę i/lub woreczek strunowy z dostarczonego zestawu do czasu wydania wyniku. Wymazówka i/lub woreczek strunowy mogą zostać wykorzystane w przypadku konieczności ponownego pobrania wymazu/mikroślądu wynikającej ze zbyt małej ilości DNA w dostarczonej próbce.

## WYPEŁNIENIE FORMULARZA

### 1. WPISZ DANE ZAMAWIAJĄCEGO

(imię i nazwisko, datę wypełnienia zamówienia - **niezbędną do odczytania wyniku**, numer telefonu lub e-mail - **niezbędny do kontaktu**).

### 2. WYBIERZ I ZAZNACZ SPOSÓB OTRZYMANIA WYNIKU

(w przypadku braku zaznaczonego sposobu przesłania wyników **domyślnie wyniki zostaną umieszczone na stronie [www.papgen.diag.pl](http://www.papgen.diag.pl)**).

### 3. UZUPEŁNIJ TABELĘ

(np. próbka A - np. domniemany ojciec, wymaz, data pobrania np. 21-01-2020, wybierz płeć; próbka B- np. dziecko I, mikroślad - np. paznokcie, data pobrania: 22-01-2020, wybierz płeć).

### 4. ZAPOZNAJ SIĘ Z OŚWIADCZENIEM, UZUPEŁNIJ DATĘ I PODPISZ ZAMÓWIENIE (żółte pole).

### 5. ZACHOWAJ WIZYTÓWKĘ UMIESZCZONĄ W ZESTAWIE,

Na drugiej stronie wizytówki znajduje się kod kreskowy zamówienia. **Jest on niezbędny do odczytu wyniku on-line na stronie [www.papgen.diag.pl](http://www.papgen.diag.pl) i uzyskania informacji o zleconym badaniu. Pamiętaj także o zapisaniu / zapamiętaniu daty wypełnienia formularza zamówienia, ponieważ jest ona niezbędna do odebrania wyniku on-line.**

## WYSYŁKA ZESTAWU Z MATERIAŁEM DO BADAŃ ORAZ ZLECENIEM

Spakuj zlecenie wraz z pobranymi materiałami do otrzymanego pudełka.



### Wysyłka kurierem DHL

przy użyciu koperty z etykietą zwrotną:

Zapakuj zestaw w kopertę z etykietą zwrotną DHL.

Wejść na stronę [papgen.diag.pl/badania wysyłkowe](http://papgen.diag.pl/badania/wysylkowe) lub <https://dhl24.com.pl/zwroty/>

Wpisz numer przesyłki z etykiety zwrotnej, następnie kliknij ikonkę „zwróć paczkę”

Wybierz sposób oddania przesyłki (punkt DHL, POP: Żabka, InMedio lub czekaj pod wskazanym adresem na kuriera).

**Przesyłka jest opłacona.**




Nr przesyłki: 23252550532

POSIADAM NUMER PRZESYŁKI DO ZWROTU

Numer przesyłki do zwrotu

Zwróć paczkę

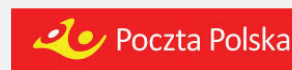

### Wysyłka Poczta Polska:

zapakuj zestaw w kopertę ze stemplem zwrotnym oraz adresem PAPGEN i oddaj w placówce pocztowej.

**Przesyłka jest opłacona.**

## ODBIÓR WYNIKU



### DOSTĘP ON-LINE

poprzez stronę internetową [www.papgen.diag.pl](http://www.papgen.diag.pl) za pomocą kodu zamówienia (kod kreskowy przyklejony na wizytówce PAPGEN identyczny z kodem przyklejonym w prawym górnym rogu zamówienia) oraz daty wypełnienia formularza zamówienia w formacie: DD-MM-RRRR wpisana na formularzu w żółtym polu.

### WYSYŁKOWO

**Poczta Polska** (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub **DHL** w wersji papierowej na życzenie klienta; aby uzyskać wersję papierową należy uzupełnić pole adres, na który ma zostać wysłany wynik w formie papierowej.

UWAGI: Data znajdująca się na pudełku jest datą przydatności zestawu do użycia.

Informacja o przebiegu badań i wynikach:

**663 680 416**

Infolinia czynna pn.-pt. 8:00-16:00