

ODEŚLANIE ZESTAWU:

80 dni

W zestawie znajduje się zwrotny list przewozowy, który jest **ważny 80 dni roboczych** od daty wystawienia.



Wysyłka kurierem DHL przy użyciu koperty z etykietą zwrotną:

Zapakuj zestaw w załączoną kopertę oklejoną etykietą zwrotną DHL.

Wejdź na stronę <https://dhl24.com.pl/zwroty/>

Wpisz numer przesyłki z etykiety zwrotnej, następnie kliknij ikonkę „zwróć paczkę”. Przesyłka jest opłacona.



Wysyłka powinna nastąpić **w dniach poniedziałek - piątek**.

Nie powinna być nadawana przed dniami świątecznymi.

ODBIERZ WYNIKI ON-LINE

NUMER ZLECENIA

Uwaga!
Numer zlecenia jest unikalny i służy do identyfikacji Twojego badania w laboratorium. Będzie Ci potrzebny do odbioru wyników online!



1. wejdź na stronę <https://wyniki.diag.pl>,
2. wybierz „POJEDYNCZE ZLECENIE
3. wpisz NUMER ZLECENIA oraz DATĘ URODZENIA

W razie pytań dotyczących testu i wykonania pobrania skontaktuj się z informacją medyczną:

695 235 299

e-mail: kontakt@polskagenetyka.pl

DIAGpack

BADANIE LABORATORYJNE DO SAMODZIELNEGO POBRANIA

INSTRUKCJA POBRANIA

PAKIET PRZEZNACZONY DLA KOBIEC

DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ UROGENITALNYCH



Przekazujemy Paniom zestaw umożliwiający samodzielne pobranie w zaciszu domowym materiału komórkowego do badania molekularnego. **Test pozwala na szybką i czułą diagnostykę infekcji urogenitalnych.**

SKŁAD ZESTAWU:

- szczoteczka Evalyn®Brush,
- foliowa torebka,
- kod kreskowy do naklejenia na szczoteczkę,
- oświadczenie i potwierdzenie danych osobowych,
- instrukcja pobrania,
- zwrotna koperta i etykieta wysyłkowa,
- e-voucher.



www.diagnozyka.pl



DIAGNOSTYKA
laboratoria medyczne
...więcej niż wynik

PRZED ROZPOCZĘCIEM POBRANIA:

- Umieść wszystkie elementy na czystej powierzchni i sprawdź, czy zestaw jest kompletny.
- Jeśli brakuje elementów lub są one uszkodzone, nie używaj zestawu skontaktuj się pisząc na adres mailowy: **diagpack@diag.pl**
- Nie używaj podczas menstruacji.
- Nie używaj w ciąży ani przez trzy miesiące po zakończeniu ciąży.
- Nie używaj żadnych produktów dopochwowych przez co najmniej dwa dni przed użyciem szczoteczki Evalyn®Brush. Można normalnie używać dopochwowych środków


antykoncepcyjnych, prezerwatyw oraz środków nawilżających na bazie wody.

- Wyłącznie do jednorazowego użytku.
- Wypełnij i podpisz w prawym dolnym rogu OŚWIADCZENIE.
- W przypadku osoby niepełnoletniej, OŚWIADCZENIE podpisuje opiekun prawny.


UWAGA! Nieprawidłowe pobranie materiału może skutkować niemożliwością uzyskania wyniku.

INSTRUKCJA POBRANIA:


-  1. Przed użyciem umyj ręce.
-  2. Wyjmij szczoteczkę Evalyn®Brush z opakowania. Nie wyrzucaj opakowania, gdyż będzie ono potrzebne do wysłania szczoteczki Evalyn®Brush do laboratorium po użyciu.
-  3. Ściśnij boki różowej nasadki za pomocą kciuka i palca wskazującego w celu jej zdjęcia ze szczoteczki Evalyn®Brush. Pamiętaj, aby nie dotykać rękami białych włosków szczoteczki Evalyn®Brush!
-  4. Pobieraj próbkę w pozycji stojącej. Zapewnij sobie wygodne podparcie (takie jak np. do wkładania tamponu).
-  5. Rozchyl jedną ręką wargi sromowe, a drugą wprowadź szczoteczkę Evalyn®Brush do pochwy, aż skrzydełka zetkną się z wargami sromowymi.

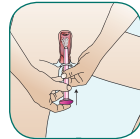


6. Przytrzymaj przezroczystą obudowę jedną ręką, a drugą dociśnij różowy uchwyt w kierunku przezroczystej obudowy. Gdy szczoteczka znajdzie się we właściwym położeniu z różowym uchwytem przy obudowie, usłyszysz i poczujesz kliknięcie.

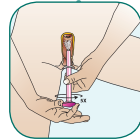

7. Obróć różowy uchwyt o pięć obrotów w tym samym kierunku. Po każdym obrocie usłyszysz kliknięcie. Kliknięcia będą pomocne w liczeniu obrotów. Po pięciokrotnym obrocie uchwytu ostrożnie wyjmij szczoteczkę Evalyn®Brush.

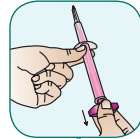


8. Przytrzymaj przezroczystą obudowę jedną ręką, a drugą pociągnij różowy uchwyt, aż biała szczoteczka schowa się w obudowie. Podczas wykonywania tej czynności nie dotykaj szczoteczki Evalyn®Brush powyżej skrzydełek.

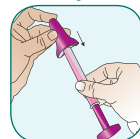

9. Przytrzymaj przezroczysty koniec tak, aby biała szczoteczka nie wysunęła się ponownie. Umieść różową nasadkę z powrotem na szczoteczce Evalyn®Brush za pomocą kciuka i palca wskazującego. Po prawidłowym założeniu usłyszysz kliknięcie.



10. Naklej na przezroczystą obudowę szczoteczki - wzdłuż obudowy - naklejkę z indywidualnym kodem kreskowym. Umieść szczoteczkę Evalyn®Brush z powrotem w plastikowym opakowaniu.

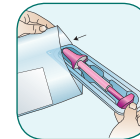

11. Umieść opakowanie zawierające szczoteczkę Evalyn®Brush w dostarczonej plastikowej torebce i zamknij torebkę.



12. Zapakuj opakowanie ze szczoteczkę Evalyn®Brush do pudełka.

13. **Pamiętaj**, że do pudełka musi zostać **dołączone dokładnie wypełnione oświadczenie opisane datą pobrania oraz e-voucher** otrzymany wraz z zestawem do pobrania materiału.



Pudełko wyślij najpóźniej w następnym dniu roboczym po pobraniu. Do czasu odbioru przesyłki przez kuriera przechowuj je w temperaturze pokojowej z dala od źródeł światła i ciepła.